

September 2023

Desinfektion af tandtekniske arbejder på Tandlægeskolens klinikker

Ved håndtering af tandtekniske arbejder anvendes **handsker**. Ved risiko for stænk og sprøjt, fx ved skylning af aftryk eller pudsning og polering anvendes endvidere **mundbind og beskyttelsesbriller**.

Alle aftryk, kroner, proteser, bidskiner og øvrige tandtekniske arbejder skal desinficeres, inden de overføres fra klinik til dentallaboratorium (såvel på Tandlægeskolen som eksternt), og igen når de returneres fra laboratoriet, inden de prøves i munden på patienten. Desinfektionen foretages ved

10 minutters henstandsdesinfektion i 0,2% Presept^R-opløsning (1000 ppm diklorisocyanurat):

- Aftrykket/øvrigt tandteknisk arbejde anbringes i éngangsbeholder med en 0,5g Presept^R-tablet og 250 ml vand fra målebæger (to tabletter i 500 ml vand ved behov), og låget lægges på.
- Efter 10 minutters henstandsdesinfektion kasseres opløsningen, og aftrykket/arbejdet skylles grundigt under rindende vand

Aftryk og sammenbid:

- Umiddelbart efter udtagning fra munden skylles aftrykket/sammenbiddet forsigtigt for blod og saliva under rindende vand, og evt. vatruller fjernes
- Derpå anbringes aftrykket/sammenbiddet 10 minutter i en 0,2% Presept^R-opløsning i en engangsbeholder med låg ved behandlingsenheden
- Aftrykket/sammenbiddet skylles atter under rindende vand

Restaureringer af metal, porcelæn, plast mv. (fx kroner, broer, bidskiner, proteser, plastroner):

- Når en restaurering modtages fra dentallaboratoriet, anbringes den 10 minutter i en 0,2% Presept^R-opløsning i engangsbeholder med låg, hvorefter den skylles under rindende vand, inden den prøves i munden på patienten
- Efter prøvning i munden skal restaureringer, der skal forarbejdes i studenterlaboratorierne, atter anbringes i en 0,2% Presept^R-opløsning i engangsbeholder med låg og derefter skylles under rindende vand inden pudsning, polering mv.
- Ved pudsning og polering med pimpsten og kridt må den samme portion kun anvendes til én og samme patient. Pimpsten og/eller kridt anbringes i éngangsbeholder og påføres restaureringen herfra under pudsningen. Der må ikke anvendes pimpsten og kridt fra bakkerne, der er anbragt under pudsehjulene
- Efter polering rengøres restaureringen grundigt med ren neglebørste og sæbe under rindende vand, før den atter placeres i munden
- Restaureringer der efter prøvning i munden skal sendes tilbage til dentallaboratoriet til videre forarbejdning, anbringes 10 minutter i en 0,2% Presept^R-opløsning i engangsbeholder med låg og skylles under rindende vand inden afsendelsen